

ИНСТРУКЦИЯ

по применению

Щиток лицевой ЭЗЛ-002 ТУ ВУ 193320686.001-2020

(ООО «ДП-технолоджи», Республика Беларусь)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение и область применения изделия.
2. Транспортирование и хранение.
3. Показания и противопоказания и к применению изделия.
4. Меры предосторожности.
5. Порядок работы с изделием.
6. Гарантии производителя.

1. Назначение и область применения медицинского изделия

Настоящие инструкция по применению распространяется на Щиток лицевой ЭЗЛ-002 ТУ ВУ 193320686.001-2020 (далее – экран или изделие) предназначенного для эффективной защиты лица, глаз, органов дыхания от прямого попадания мелких частиц и пыли, а также при выполнении всех видов работ, связанных с пылевыделением, защиты лица от воздействия от брызг жидкостей.

Область применения – Щитки лицевые также предназначены для ограничения и уменьшения воздействия опасных факторов на работающих

2. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

2.1 Хранение должно производиться при температуре от +5°C до +40°C с влажностью воздуха до 80% без образования конденсации, на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

2.2 Транспортировка изделий может осуществляться любыми видами крытого транспорта с соблюдением условий хранения. Изделия в транспортной упаковке устойчивы к воздействию механических факторов, возникающих при транспортировании. Температурные условия перевозки от -20°C до +40°C с влажностью воздуха до 80% без образования конденсации.

2.3 Срок годности или символ нанесены на каждую потребительскую упаковку (коробку) и транспортную тару (коробку).

3. ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ

3.1 ПОКАЗАНИЯ

Щиток лицевой имеет многогранное применение и предназначен для защиты лица, глаз, органов дыхания от прямого попадания мелких частиц и пыли, а также при выполнении всех видов работ, связанных с пылевыделением.

3.2 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказания не выявлены.

3.3 ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Возможные побочные действия не выявлены.


4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Чрезвычайно важным аспектом профилактики профессионального инфицирования является использование разных средств индивидуальной защиты, в том числе защитные экраны для лица. Защитные экраны должны обладать не только хорошими защитными свойствами, но и обеспечивать хорошую видимость для работника во время работы. Для обеспечения этой цели следует соблюдать правильную эксплуатацию изделия в соответствии с инструкцией по применению, обеспечивать правильное хранение, уход за защитными экранами для лица и соблюдать следующие меры предосторожностей:

- регулярно чистить поверхность щитков защитного экрана слабым мыльным раствором с последующим ополаскиванием водой.
- защищать щитки экрана от механических повреждений, особенно от соприкосновения щитков с острыми металлическими предметами.
- хранить экран после чистки в месте, недоступном для прямых солнечных лучей.
- материалы, контактирующие с кожей человека, могут вызывать аллергическую реакцию при индивидуальной чувствительности.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ИЗДЕЛИЕМ

1. Перед началом сборки снимите ЗАЩИТНЫЕ ПЛЕНКИ с обеих сторон держателя и щитка;
2. Зафиксируйте держатель по нужному размеру (рис. 1);
3. Соберите щиток, вставив в пазы фиксирующие элементы (рис. 2);
4. Соедините держатель и щиток (рис. 3).

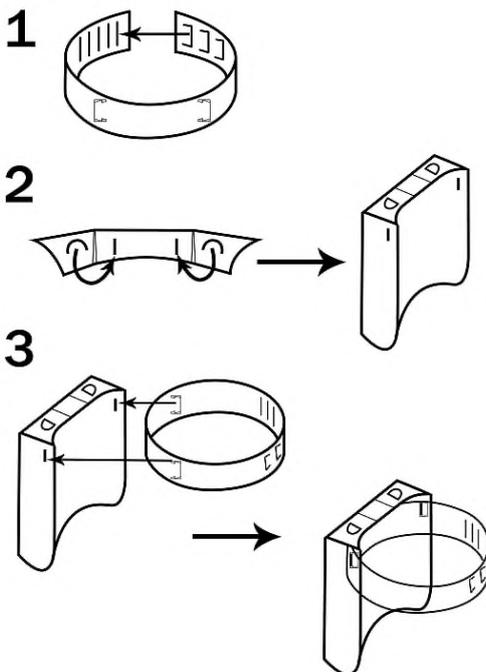

Указания по очистке и дезинфекции

Для быстрой чистки защитных щитков и оправы используйте раствор 3% перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства.

Внимание!!! Не погружать защитные щитки в химические растворы. Материал устойчив к обработкам антисептическими средствами, в том числе спиртосодержащими. Для очистки НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ растворители на основе ацетона!

Не стерилизовать в автоклаве.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ в течение 3 месяцев со дня отгрузки потребителю при условии соблюдения потребителем правил транспортирования и хранения, установленных эксплуатационной документацией.